

デンチャーブラシ

使い方ガイド



DENTURE BRUSH

デンチャーブラシの使い方

\STEP/

01

入れ歯とデンチャー
ブラシを用意します。



片手でもラクラク♪



\STEP/

02

入れ歯をデンチャー
ブラシにはめ込みます。



滑り止め付き

かんたん
3ステップ

\STEP/

03

ゴシゴシひねりながら磨
きます。



水を出しながら
丸ごと洗える!



たったこれだけで毎日
入れ歯がピカピカに!



※ 取り替え目安は約6ヶ月です

⚠ 使用上の注意 ⚠

- 毛先が曲がってくると、刷掃効果が低下します。また、衛生的に保つためにも、半年を目安にブラシを交換してください。
- ブラシについて汚れはなるべく取り除き、清潔な状態でご使用ください。
- 不安定な場所でのご使用は、ブラシ本体が床下に落下、破損の原因になります。
- フタは、構造上外れやすくなっております。落下に十分ご注意ください。
- 直射日光の当たる場所での保管や熱湯消毒は避けてください。変形、劣化の原因になります。
- ブラシ部のヒンジ部分（折り曲がる部分）は、無理に引っ張ったりすると、破損の原因になります。
- 本体裏面の滑り止めの接着剤が劣化すると、シリコンが外れてしまいます。紛失や誤飲にご注意ください。
- 磨きすぎは義歯が傷つきますので、必要以上に義歯を擦らないようご注意ください。

